



ИНСТРУКЦИЯ

по применению полосок индикаторных экспресс-контроля концентраций дезинфицирующих средств производства ЗАО «Медлекспром», одноразовых
"Дезиконт-Амиксидин" № 154.232.09 ИП

1. Назначение

Полоски индикаторные "Дезиконт-Амиксидин" (далее – индикаторные полоски), выпускаемые в соответствии с ТУ 9398-070-11764404-2007, предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов дезинфицирующего средства "Амиксидин" с концентрацией 0,01; 0,05^{*)}; 0,1^{*)}; 0,2^{*)}; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5^{*)}; 2,0^{*)}; 2,5; 3,0 и 4,0% по препарату.

В комплект поставки входят (шт): индикаторные полоски-100; инструкция по применению-1; банка-1; элемент сравнения-1 (может быть нанесен на банку); контрольные этикетки-40; упаковочная коробка-1.

Индикаторные полоски предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с «Инструкцией №02/08 по применению средства дезинфицирующего «Амиксидин» фирмы ЗАО «МЕДЛЕКСПРОМ», Россия, для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах.

2. Применение

2.1 Контроль рабочих растворов концентраций 0,01%, 0,25%, 0,5%, 1,0%, 2,5%, 3,0% и 4,0% по препарату.

В мензурку или стакан наливают 100 мл хорошо перемешанного (избегать вспенивания) рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Из банки достают индикаторную полоску и погружают ее примерно на 1 с в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Полоску извлекают из раствора и быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски о край стакана. Полоску кладут на белую фильтровальную бумагу, бумажную или марлевую салфетку индикаторной зоной вверх и выдерживают 1 минуту (по секундомеру или часам с секундной стрелкой). Затем в течение 30 секунд сопоставляют цвета зон полоски с цветовой шкалой элемента сравнения.

Полученный результат записывают в прилагаемую этикетку, затем этикетку вклеивают в журнал генеральных уборок или наклеивают на емкость с дезинфицирующим средством.

2.2 Контроль рабочих растворов с концентрациями 0,05%, 0,1%, 0,2%, 1,5% и 2,0% по препарату.

Контроль рабочих растворов дезинфицирующего средства «Амиксидин» концентрации 0,05%, 0,1%, 0,2%, 1,5% и 2,0% по препарату проводят согласно п. 2.1 после их разведения питьевой водой комнатной температуры в соответствии с таблицей разведений (см. Таблицу 1).

Примечания:

1. Необходимо соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе и на фильтровальной бумаге.
2. Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественным.
3. Раствор, использованный для анализа, нельзя применять для дезинфекции.
4. Определение концентрации раствора проводят три раза. Результат определения считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух определениях.

При необходимости повторения анализа, используют свежую порцию раствора.

В случае получения неоднозначных результатов определение концентрации необходимо провести методом, рекомендованным производителем данного дезинфицирующего средства.


**) - определение концентрации проводят после предварительного разведения анализируемой порции рабочего раствора*

Таблица 1.

Рекомендуемое разведение анализируемых порций рабочих растворов, концентрации которых не приведены на элементе сравнения.

Концентрация исходного рас- твора по пре- парату, %	Разведение, мл		«Дезиконт-Амиксидин» Концентрации рабочих растворов по препарату, %	
	исходный раствор	вода питьевая	0,01	0,5
0,05	20	80	*	
0,1	10	90	*	
0,2	5	95	*	
1,5	30	60		*
2,0	25	75		*

Схема проведения экспресс-контроля

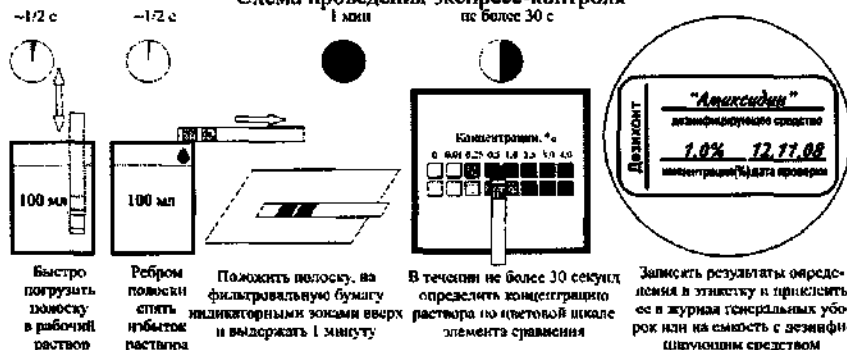

Внимание:

- пары аммиака и его растворов (нашатырный спирт) могут оказать влияние на результаты определения, поэтому не применяйте и не храните индикаторные полоски в помещениях, в которых используются аммиак и аммиачные растворы;
- не используйте индикаторные полоски "Дезиконт-Амиксидин" для определения концентрации растворов других дезинфицирующих средств;
- не удаляйте избыток раствора с полосок фильтровальной бумагой;
- не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств;
- используйте прилагаемый элемент сравнения только для данной упаковки индикаторных полосок;
- извлекайте из пенала только необходимое для определения количество индикаторных полосок, пенал не держите открытым;
- полоски следует использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия банки.

3. Требования безопасности

Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности и защиты окружающей среды не требуется.

После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы.

4. Хранение и транспортирование

Индикатор хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от 5°C до 40°C и влажности не более 80%, не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 15°C.

Срок годности - 1 год с даты изготовления, указанной на упаковке.