

$$C = \frac{E_{оп}}{E_k} \times C_k \times 251,$$

где: $E_{оп}$ - величина оптической плотности анализируемой пробы, ед. опт. плотн.;
 E_k - величина оптической плотности калибратора, ед. опт. плотн.;
 C_k - концентрация гемиглобинцианида в калибраторе, г/л;
 251 - коэффициент разведения пробы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при комнатной температуре в течение всего срока годности.

Срок годности набора - 18 мес.

Рабочий реагент можно хранить в темном месте в плотно закрытой посуде при комнатной температуре не более 3 мес.

Калибратор после вскрытия ампулы можно хранить при комнатной температуре в темном месте в плотно закрытом виде не более 8 часов.

Для отбора и добавления анализируемых проб и компонентов набора рекомендуется использовать полуавтоматические одноканальные пипетки, аттестованные на точность по значению средней дозы и сходимости результатов пипетирования.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.

По вопросам, касающимся качества набора, следует обращаться в ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» по адресу:

194 156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27.

Тел./факс: (812) 326-61-98.

и в Лабораторный Центр ФГУ «НЦ ЭСМП» Росздравнадзора по адресу:

117246, Москва, Научный проезд, д.14 а.


Тел.: (499)120-60-96.

Генеральный директор
 ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



Е.Н. Схолль-Энгбертс

Зав. кафедрой клинической лабораторной
 диагностики с курсом молекулярной медицины,
 директор НЦ «Институт лабораторной медицины»
 ГОУ ВПО СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова Росздрава,
 Главный специалист-эксперт
 по клин. лаб. диагностике Росздравнадзора
 по С-ЗФО, д. м. н., профессор

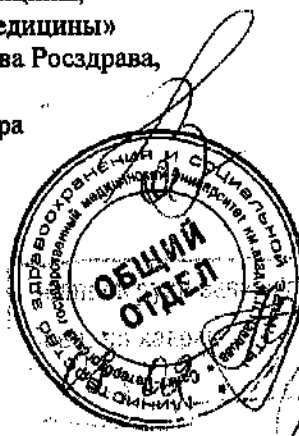

В.Л.Эмануэль

