

Инструкция по применению

«Лампа щелевая офтальмологическая SL 1000 с принадлежностями».

ОПИСАНИЕ

Лампа щелевая офтальмологическая SL 1000 с принадлежностями предназначена для биомикроскопического исследования переднего и заднего отдела глаза, диагностики, фотографирования и видеозаписи изображения глаза.

СОСТАВ

- I. Лампа щелевая офтальмологическая модели SL 1000, состав:
 1. Основная часть с винтом крепления к основанию.
 2. Основание с джойстиком, осью и шестернями перемещения.
 3. Блок окуляров.
 4. Держатель головы с устройством фиксации взора.
 5. Ручки для держателя головы (не более 4 шт.).
 6. Боковые крышки (не более 4 шт.).
 7. Защитный экран.
 8. Стержень для контроля щели.
 9. Бумажные прокладки (не более 20 шт.).
 10. Запасная лампа.
 11. Сетевые кабели (не более 4 шт.).
 12. Пылезащитный чехол.
 13. Крепеж.
 14. Шестигранный ключ.
 15. Блок питания.
 16. Направляющие для основания (не более 4 шт.).
 17. Пластина под джойстик.
 18. Предохранители (не более 8 шт.).
 19. Электрический стенд в комплекте.
 - Основание стенда.
 - Направляющие для основания (не более 4 шт.).
 - Пластиковая панель основания стенда.
 - Моторизированная колонка с основанием.
 - Колеса (4 шт.).
 - Сетевой кабель.
 - Выдвижной ящик для аксессуаров
 - Пульт управления (с главным выключателем, регулятором выбора напряжения, разъемом для подключения устройства фиксации взора, разъемом для электропитания и предохранителями).
 - Крепеж.
 20. Инструкция по эксплуатации
- II. Принадлежности для щелевых ламп:
 1. Электрический стенд в комплекте:
 - Основание стенда.
 - Направляющие для основания (не более 4 шт.).
 - Пластиковая панель основания стенда.
 - Моторизированная колонка с основанием.
 - Колеса (4 шт.).

- Сетевой кабель.
 - Выдвижной ящик для аксессуаров
 - Пульт управления (с главным выключателем, регулятором выбора напряжения, разъемом для подключения устройства фиксации взора, разъемом для электропитания и предохранителями).
 - Крепеж.
2. Блок окуляров со встроенными фильтрами.
 3. Делитель луча.
 4. Делитель луча с видеоадаптером.
 5. Видеоадаптер.
 6. Тубус ассистента.
 7. Адаптер для цифровой камеры.
 8. Оптический блок подсветки для цифровой видеокамеры.
 9. Линза Груби.
 10. Аппланационный тонометр.
 11. Установочная пластина для аппланационного тонометра.
 12. Конус тонометра.
 13. Цифровая система обработки изображения.
 14. Окуляр.
 15. Блок питания для щелевой лампы.
 16. Пульт управления стенда.
 17. Двигатель моторизированной колонки стенда.
 18. Плата управляющая моторизированной колонки стенда.
 19. Столешница.
 20. Ось основания.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удобный угол обзора и быстрое переключение увеличения.
- Среди основных настроек – контролируемое движение под прямым углом в трех плоскостях (x, y, z), управляемое одним джойстиком.
- Микроскопическое стереообследование глаза с освещением щелевой лампой и возможностью увеличения в 6, 10, 16, 25 и 40 раз.
- Микроскопическое обследование задней стенки и задней части стекловидного тела с помощью дополнительно устанавливаемых линз Груби либо контактной оптики (линз Гольдмана).
- Обследование глаза и оценка положения контактных линз методом флюоресценции.
- Измерение диаметра роговицы и контактных линз.
- Видеозапись обследования глаза.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на панели приборов.
- Если напряжение в сети отличается от требуемого, установите селектор напряжения, расположенный на разъеме питания, в положение, соответствующее правильному значению. Электрическая система должна соответствовать стандартам электрических систем для помещений медицинского назначения CEI либо IEC. Если вы не уверены в последнем, проконсультируйтесь со специалистом по установке и техническому обслуживанию электрической системы.

- Не используйте разветвители и удлинители для соединения разъема питания инструмента с розеткой.
- Отключая питание инструмента, держитесь за вилку, а не за силовой кабель; не тяните за кабель для отключения питания.
- Не прикасайтесь к силовому кабелю влажными руками; не наступайте на кабель и не ставьте на него тяжелые предметы; не завязывайте кабель узлом.
- Поврежденный силовой кабель может привести к возгоранию и поражению электрическим током и, следовательно, нуждается в периодическом осмотре. В случае необходимости замены кабеля, поставленного в комплекте с инструментом, обратитесь к поставщику.
- Не пытайтесь самостоятельно производить какие-либо технические работы с инструментом либо электрической системой, кроме указанных в данной инструкции.
- Не пользуйтесь инструментом вблизи источника воды; не проливайте воду на какие-либо части инструмента. Не устанавливайте инструмент в местах с повышенной влажностью, запыленностью, а также резкими изменениями температуры и/или влажности.
- Отключайте питание инструмента перед чисткой либо дезинфекцией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- а) Усадите пациента в удобное положение, зафиксируйте подбородок на опоре для подбородка, а лоб – на опоре для лба.
- б) Настройте рукав, поднимая либо опуская опору для подбородка таким образом, чтобы глаза пациента оказались на одном уровне с отметками на опоре для подбородка.
- в) Включите инструмент; переключатель загорится.
- г) При помощи селектора настройте необходимую яркость света.
- д) При помощи джойстика настройте и сфокусируйте инструмент на обследуемом глазу.

Производитель:

1. Alcon Laboratories, Inc., США
6201 South Freeway, Fort Worth, Texas, 76134
Тел./Факс 817-293-0450, e-mail: AlconLabs.com


2. C.S.O. SRL, Италия
VIA DEGLI STAGNACCI 12/E,
50010 BADIA A SETTIMO (FI) ITALY

Владелец регистрации на территории Российской Федерации

ООО «Алкон Фармацевтика»

Адрес компании ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий:

109004, Москва, ул. Николоямская, 54

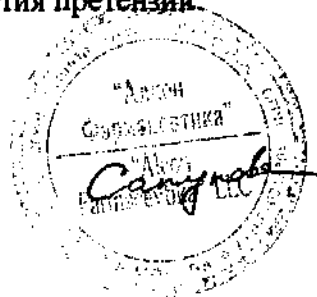

ВСЕГО

ПРОИЗВЕДОВАНО

И СЕРТИФИКАТОМ ПЕЧАТЮ

ЭЛИСТА

Фармацевтика"

Ташкентский

