


**Инструкция по применению
жгута кровоостанавливающего «ФЭСТ»
из эластичной тесьмы**

Перед применением проверить соединение фиксатора с корпусом (см. рис.). Если соединение нарушено, то вставить фиксатор в корпус, совместив пазы со штырьками, и сдвинуть до упора в направлении петли жгута.

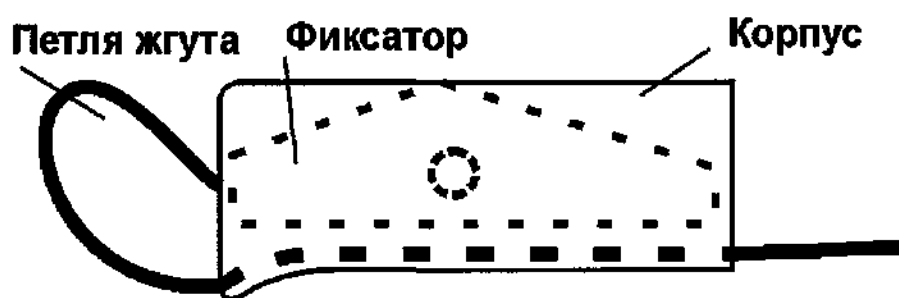

Разместить петлю жгута выше раны и затянуть до прекращения кровотечения из раны пострадавшего или до прекращения прощупывания пульса, для снятия жгута нажать на фиксатор.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Дата	ТУ 9398 - 057- 10973749 - 2006	Лист
							11

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ