


**Инструкция по применению  
жгута кровоостанавливающего «ФЭСТ»  
из эластичной тесьмы**

Перед применением проверить соединение фиксатора с корпусом (см. рис.). Если соединение нарушено, то вставить фиксатор в корпус, совместив пазы со штырьками, и сдвинуть до упора в направлении петли жгута.

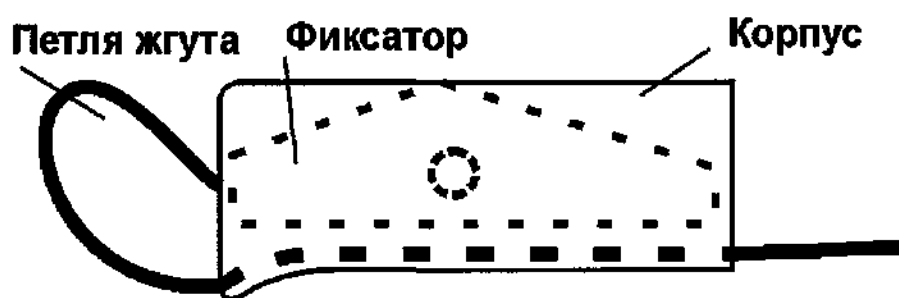

Разместить петлю жгута выше раны и затянуть до прекращения кровотечения из раны пострадавшего или до прекращения прощупывания пульса, для снятия жгута нажать на фиксатор.

|               |                |               |              |                |
|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Инов. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата |
|               |                |               |              |                |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ТУ 9398 - 057- 10973749 - 2006

Лист

11

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |            |       |                | Всего листов (страниц) в докум. | № докум.            | Входящий № сопровод. документа | Подпись | Дата |
|------|-------------------------|------------|-------|----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------|------|
|      | измененных              | замененных | новых | аннулированных |                                 |                     |                                |         |      |
| 1    | 5, 7, 8                 | 3, 4, 9    |       |                |                                 | 10973749-057.1-2009 |                                |         |      |
| 2    | 1                       |            |       |                |                                 | 10973749-057.2-2011 |                                |         |      |

|              |                |              |              |                |
|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата |
|              |                |              |              |                |

ТУ 9398 - 057- 10973749 - 2006

Лист

12

Прошито, пронумеровано,  
опечатано

\_\_\_\_\_ листов

Копия верна  
инженер-Грошев В.А.

