


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
2010г.

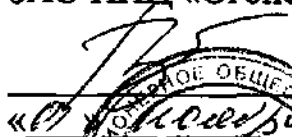

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Повязка ключичная ПК (далее – повязка).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Повязка обеспечивает опороспособность пораженной конечности с одновременным удержанием ее в заданном положении.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа повязки изготовлена из ткани "Трикор" типа "Нормафлекс", шлевки - из полиамида, плечевые элементы усилены текстильной лентой. Застежка текстильная ворсовая типа "Контакт".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция, кифотическая деформация.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Повязка надевается на хлопчатобумажное белье.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется наружная фиксация конечности в корригированном положении при поражении ключицы и ее сочленение с лопаткой и грудиной.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Повязка должна храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40 С и относительной влажности воздуха 50...70 %. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению повязкой. Стирать повязку следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.