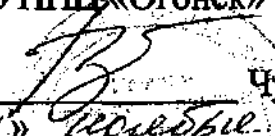


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«01» ~~ноября~~ 2010 г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Тудор на лучезапястный сустав с фиксацией кисти и пальцев
(правый, левый) ТР0-15 (далее – тудор).

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Тудор обеспечивает опороспособность пораженной конечности с одновременным удержанием ее в заданном положении с частичной разгрузкой, сохраняя подвижность в неповрежденных суставах. Тудор показан при реабилитации после травм и операций в области лучезапястного сустава: перелом луча в типичном месте без смещения, замедленная консолидация при переломе луча в типичном месте, переломовывихах в области лучезапястного сустава, коррекция косоруконости и так далее. Может применяться для профилактики возникновения ульнарных и радиальных девиаций кисти, сгибательных контрактур лучезапястного сустава в ревмоортопедии и нейроортопедии.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Тудор состоит из ложементы, изготовленного из полипропилена, сдублированного с полиэтиленом и четырёх застёжек текстильных ворсовых типа «Контакт».
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция, выраженная контрактура лучезапястного сустава.
- 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Тудор надевается непосредственно на тело и фиксируется на верхней конечности пациента.
- 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляет фиксацию лучезапястного сустава, кисти и пальцев, исключая движения в них.
- 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Тудор должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению тудором.

Главный инженер


Чулкова М.М.