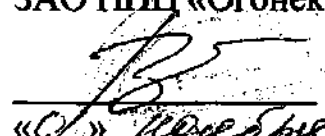


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

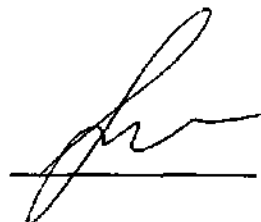

Чугунов В.В.
«01» ноября 2010г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Разгружающая повязка для верхней конечности «Косынка» (левая, правая) ПВК
(далее – повязка).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Повязка применяется при повреждениях и заболеваниях связочно-мышечного и костного аппарата верхней конечности. Например, после травм и операций в области ключично-акромиального сочленения, плечевого сустава, плечевой кости, локтевого сустава и костей предплечья для фиксации в период ранней реабилитации. При вялых параличах после ОНМК, для профилактики развития сублюксации плечевого сустава и разгибательных контрактур верхней конечности. Для иммобилизации при резко выраженных болевых ощущениях при нейро-ортопедических синдромах.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из трикотажа, ремни - из ткани «Трикор», шлевки - из полиамида. Застежка текстильная ворсовая типа «Контакт».
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Повязка не показана при необходимости стабильной фиксации костных обломков, чаще всего в остром периоде, до образования первичной костной мозоли.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Повязка надевается непосредственно на тело или поверх одежды и выполняет функцию повязки Дезо.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Производится нейтрализация собственного веса верхней конечности с передачей нагрузки на здоровое предплечье и позиционная фиксация ее в щадящем положении. Повязка может применяться для транспортной иммобилизации.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Повязки должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению повязкой. Повязка не должна подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать повязку следует с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.