

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»



Чугунов В.В.
2010г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Наколенник с шарнирами Н5 (далее – наколенник).**

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Наколенник предназначен для стабилизации коленного сустава во фронтальной плоскости с предотвращением переразгибания в коленном суставе при умеренной варусной и вальгусной девиации голени, рекурвации в коленном суставе, менисцитах, лигаментитах, бурситах, синовитах.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани "Трикотаж". Наколенник армирован двумя профилированными шарнирами, выполненными из ударопрочных пластмасс. Ремни фиксации имеют застежки текстильные ворсовые типа "Контакт".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Наколенник надевается непосредственно на тело.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется фиксация коленного сустава во фронтальной плоскости, дозированная компрессия и прогрев подлежащих тканей, защита мягких тканей суставной области от механического воздействия.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Наколенник должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению наколенником. Наколенник не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать наколенник следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

Чулкова М.М.