

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«01» ноября 2010г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Наколенник с армировкой и надпателлярным отверстием Н4.

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Наколенник Н4 предназначен для фиксации коленного сустава с целью фронтальной стабилизации в реабилитационном периоде после травм и операций на коленном суставе, при умеренной нестабильности коленного сустава, артрозо-артритах, хроническом вывихе и подвывихе наколенника. Оказывает эффективное тепловое воздействие.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани «Трикор». Наколенник Н4 армирован двумя семизвенными лонгетами, выполненными из ударопрочных пластмасс.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Не применяется при выраженной фронтальной нестабильности или выраженной контрактуре коленного сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Наколенник Н4 надевается непосредственно на тело.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется фиксация коленного сустава с целью фронтальной стабилизации. Эффективное тепловое воздействие. Защита мягких тканей суставной области от механического воздействия.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Наколенник Н4 должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению наколенником Н4. Наколенник Н4 не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать наколенник Н4 следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.