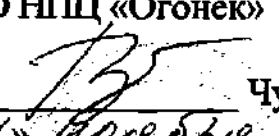


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«01» ноября 2010г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Наколенник с армировкой НЗ.

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Наколенник НЗ предназначен для фиксации коленного сустава с целью фронтальной стабилизации в реабилитационном периоде после травм и операций на коленном суставе, при умеренной нестабильности коленного сустава, остеоартрозе, хроническом вывихе и подвывихе наколенника.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани "Трикор". Наколенник НЗ армирован двумя семизвенными лонгетами, выполненными из ударопрочных пластмасс.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Не применяется при выраженной фронтальной нестабильности или выраженной контрактуре коленного сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Наколенник НЗ надевается непосредственно на тело.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется фиксация коленного сустава с целью фронтальной стабилизации, эффективное тепловое воздействие, защита мягких тканей суставной области от механического воздействия.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Наколенник НЗ должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению наколенником НЗ. Наколенник НЗ не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать наколенник НЗ следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.