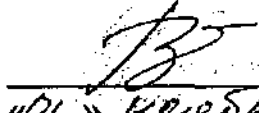


«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«01» ноября 2010г.
М.п.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Наколенник Н1.**

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Наколенник Н1 предназначен для фиксации коленного сустава и надколенника с целью стабилизации при последствиях травм и операций на коленном суставе, артрозо-артритах, бурситах, синовитах, надпателлярных бурситах. Осуществляет эффективное тепловое воздействие и защиту мягких тканей суставной области от механических воздействий.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани "Трикор".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Не применяется при выраженной фронтальной нестабильности коленного сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Наколенник Н1 надевается непосредственно на тело.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется наружная фиксация коленного сустава и надколенника с целью стабилизации, эффективное тепловое воздействие, защита мягких тканей суставной области от механического воздействия.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Наколенники должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению наколенником. Наколенник Н1 не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать наколенник Н1 с использованием нейтральных растворов моющих средств и детского мыла.

Главный инженер

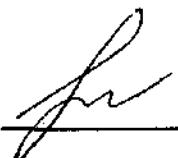
Чулкова М.М.