


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

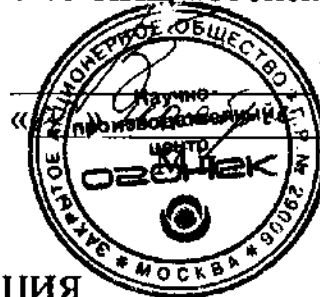

Чугунов В.В.
2010г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Наколенник короткий Н8 (далее – наколенник).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Предназначен для наружной фиксации коленного сустава и надколенника с целью стабилизации при нестабильности коленного сустава, артрозо-артритах, бурситах, синовитах, надпателлярных бурситах.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани "Трикор".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Не применяется при выраженной фронтальной нестабильности коленного сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Наколенник надевается непосредственно на тело.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется фиксация коленного сустава с целью фронтальной стабилизации, эффективное тепловое воздействие, защита мягких тканей суставной области от механического воздействия.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Наколенник должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению наколенником. Наколенник не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать наколенник следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

Чулкова М.М.