


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

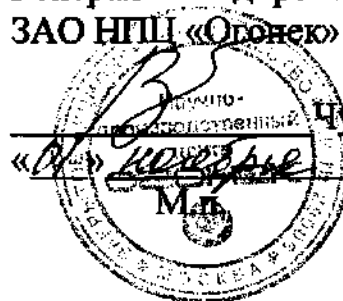

Чугунов В.В.

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Бандаж ортопедический фиксирующий БН6-10 (далее – бандаж).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Предназначен для фиксации в физиологически правильном положении органов брюшной полости и забрюшинного пространства, поддержания передней брюшной стенки при наличии грыжевого дефекта.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Бандаж изготовлен из ленты эластичной "BOOS", пенополиуретана, полотна трикотажного и застежки текстильной ворсовой типа "Контакт".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция, паховые грыжи.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж надевается на хлопчатобумажное белье и плотно фиксируется на теле пациента посредством застежки текстильной ворсовой типа "Контакт".
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется удержание передней брюшной стенки. Длительное ношение не приводит к гипотрофии мышц.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Бандаж должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению бандажом. Бандаж не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Бандаж следует надевать на хлопчатобумажное белье. Стирать бандаж следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

Чулкова М.М.