

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПФ «Ортек»



Дугунов В.В.
2010г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

Распорка детская «Перинка Фрейка» ПФ (далее – распорка).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Распорка показана при консервативном лечении дисплазии тазобедренных суставов и вправленных врожденных вывихов бедра у детей. Может применяться для фиксации положения Лоренц I и в раннем реабилитационном периоде после оперативного вправления врожденных вывихов бедра у детей.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Корпус изготовлен из листового и вспененного полиэтиленов, бретели - из текстильной ленты, застежки - из полистирола, заклепки - из полипропилена, лента-контакт - "ВЕЛКРО".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Неустранённые вывихи и подвывихи бедра, мацерация и повреждение кожных покровов в области, перекрываемой изделием.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Распорка надевается поверх одежды (подгузника, памперса).
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивает стабильную фиксацию ребенка в положении Лоренц I. По разрешению лечащего врача допускается снятие изделия для проведения массажа, лечебной гимнастики, гигиенических процедур и так далее. При применении распорки, как отводящей шины в случае аддукторного спазма допускается дозированное использование в режиме лечебной укладки сроком от 10 минут до 12 часов.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Распорка должна храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность распорок при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению распорки. Распорка не должна подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть распорку следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

Чулкова М.М.