


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

Чугунов В.В.
2010г.
М.п.

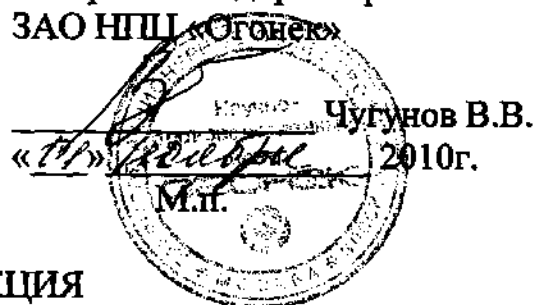

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

**Тутор на всю ногу разъемный безнагрузочный (правый, левый) ТН8-14
(далее – тутор).**

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Применяется при ДЦП, последствиях ОНМК, последствиях повреждения спинного мозга, после травм и операций на нижней конечности. Обеспечивает фиксацию коленного, голеностопного суставов и стопы в физиологическом или заданном положении.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Тутор изготовлен из полиэтилена, застежки текстильные ворсовые типа «Контакт».
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Выраженные фиксированные контрактуры коленного и голеностопного суставов и неустраняемая деформация стопы. Выраженные деформации костей конечности.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Тутор надевается на хлопчатобумажный чулок.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивается фиксация коленного, голеностопного суставов и стопы в физиологическом положении.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Туторы должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению тутором. Тутор не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть тутор следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

 Чулкова М.М.