


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПВ «Орбис»

Чугунов В.В.
2010 г.

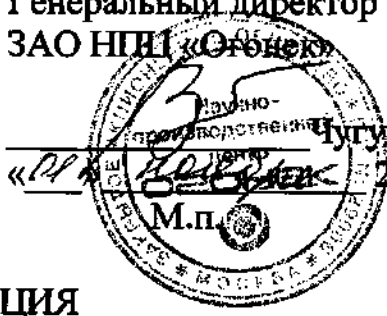


**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

**Бандаж ортопедический грыжевой паховый односторонний БН5-10
(далее – бандаж).**

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Бандаж предназначен для предотвращения выпячивания паховой и пахово-мошоночной грыжи.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Бандаж состоит из поясов, выполненных из пластины эластичной резино-тканевой "Трикор" и пелота для удержания грыжевого дефекта, выполненного из полиэтилена ламинированного. Пелот фиксируется на поясе посредством соединения типа "Контакт". Фиксация бандажа на теле пациента осуществляется с помощью застежки текстильной ворсовой типа "Контакт" и пряжки из полиамида.
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Грыжевой бандаж противопоказан при невправляемых формах паховой и пахово-мошоночной грыж, а также при необходимости значительного воздействия на паховое кольцо для предотвращения их выпячивания в условиях повседневной жизни пациента.
- 3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж надевается непосредственно на тело и фиксируется на теле пациента с помощью застежки текстильной ворсовой типа "Контакт". Регулировка по размеру поясного ремня осуществляется за счет изменения длины ленты эластичной.
- 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж применяется в повседневной жизни бодрствующего пациента.
- 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Бандаж должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению бандажом. Бандаж не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Бандаж следует надевать на хлопчатобумажное белье. Стирать бандаж следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

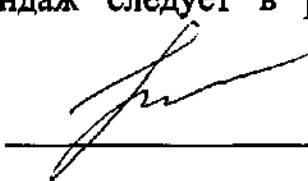
М.М. Чулкова