


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

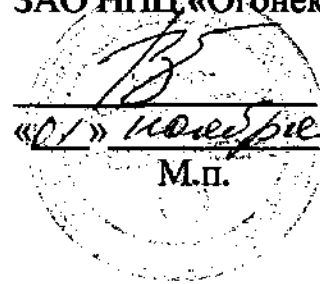

Чугунов В.В.

2010г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Тутор на лучезапястный сустав с захватом кисти и предплечья (фиксатор)
(правый, левый) ТР0-14 (далее – тутор).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Тутор обеспечивает опороспособность пораженной конечности с одновременным удержанием ее в заданном положении с частичной разгрузкой, сохраняя подвижность в неповрежденных суставах.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изделия изготовлена из ткани "Трикор" типа «Нормофлекс», шлевки - из полиамида, лонгетные карманы - из капроновой ленты, лонгеты - из алюминиевых сплавов. Застежка текстильная ворсовая типа «Контакт».
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция, выраженная контрактура лучезапястного сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Тутор надевается непосредственно на тело и фиксируется посредством застёжки типа «Контакт».
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивается жесткая фиксация кисти и дистальной двух третьей предплечья. Жесткие металлические вставки позволяют фиксировать лучезапястный сустав в необходимом положении. Лента-контакт дает регулируемую степень фиксации сегментов руки.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Туторы должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению тутором. Стирать тутор следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.M. Chulkova'.

Чулкова М.М.