


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

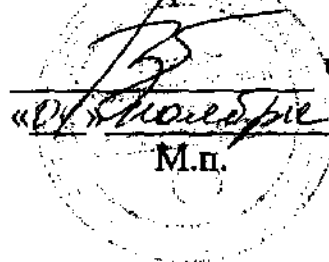

Чугунов В.В.

2010г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Тутор на лучезапястный сустав с захватом кисти (кистедержатель) (правый, левый)
ТР0-13 (далее - тутор).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Тутор предназначен для обеспечения опороспособности пораженной конечности с одновременным удержанием ее в заданном положении с частичной разгрузкой и сохранением подвижности в неповрежденных суставах. Тутор показан при реабилитации после травм и операций в области лучезапястного сустава: перелом луча в типичном месте без смещения, замедленная консолидация при переломе луча в типичном месте, переломо-вывихах в области лучезапястного сустава, коррекция косорукости. Может применяться для профилактики возникновения ульнарных и радиальных девиаций кисти, сгибательных контрактур лучезапястного сустава в ревмоортопедии и нейроортопедии. Целесообразно применение тутора при остеохондродистрофиях типа Кинбека, стилоидитах.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани "Трикор", шлевки - из полиамида, лонгетные карманы - из капроновой ленты, лонгеты - из алюминиевых сплавов, лента-контакт - "ВЕЛКРО".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Тутор не обеспечивает надежной фиксации костей предплечья, поэтому не рекомендовано в острой стадии их травматического поражения. Противопоказанием к применению являются стойкие контрактуры и деформации, а также необходимость фиксировать пальцы, например, при пластике сухожилий. Ограничением к применению являются локальные дерматиты и гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Тутор надевается непосредственно на тело и фиксируется на верхней конечности посредством застёжки «Контакт».
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляет фиксацию лучезапястного сустава, исключая движения в нем. Тутор выполняет функцию укороченной гипсовой лонгеты без захвата пальцев, фиксирующей кисть в функционально выгодном положении. Возможно изменение угла флексии и экстензии с помощью профилирования металлических лонгет, например, при ретракции сухожилий сгибателей в результате спастических параличей. Рекомендуется устанавливать тутор в положении флексии, сохраняющей движение в пальцах с последующей этапной коррекцией до функционально выгодного положения.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Туторы должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению тутора.

Главный инженер



Чулкова М.М.