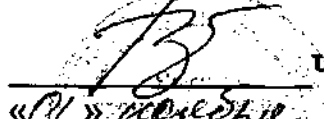


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Оgoneк»


Чугунов В.В.
«01» декабря 2010 г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Реклинатор эластичный грудного отдела позвоночника КР1-17
(далее – реклинатор).

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Реклинатор предназначен для коррекции осанки путем разведения верхнего плечевого пояса и удержания его в правильном функциональном положении. Показания к применению: формирование правильной осанки у детей и взрослых, кифозы ниже Th7 позвоночника, кифосколиозы I - II ст., остеохондроз грудного отдела позвоночника, спондилопатии, остеопороз.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Детали реклинатора: пелот спины и эластичные тяги изготовлены из ткани "Трикор". Планшетные карманы - из капроновой ленты, планшеты - из полипропилена, армированные пружинной проволокой, шлевки и замок -застежка - из полиамида, ленты замка-застежки - из капроновой ленты. Застежка текстильная ворсовая типа "Контакт".
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
- 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Реклинатор надевается на хлопчатобумажное белье, подгоняется по корпусу пациента и фиксируется под грудью с помощью замка-застёжки.
- 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется разведение плечевого пояса с мягкой коррекцией грудного отдела позвоночника с целью его реклинации и разгрузки без выключения работы собственной мускулатуры. Соединение реклинатора с корсетом на поясничный отдел позвоночника за счет регулируемого соединения дает возможность создать единую ортопедическую систему, действующую на уровне Th – L5 позвонков.
- 1. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Реклинатор должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 25°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению. Стирать реклинатор следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.