

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

Чугунов В.В.
2010г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Устройство рефлекторно-нагрузочное «ГРАВИТОН» КР6-02 (далее – устройство).

1. НАЗНАЧЕНИЕ: Устройство предназначено:

- для коррекции положения отдельных сегментов локомоторного аппарата;
- для выработки двигательного стереотипа, максимально приближенного к физиологическому;
- для тренировки мышц в оптимальном режиме под воздействием осевой нагрузки.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Устройство изготовлено из пластины резино-тканевой «Трикор», каплена, застёжки текстильной ворсовой типа «Контакт», полистролла, пенополиэтилена ППЭ-Р.

Устройство состоит из следующих элементов:

установочно-базовые:

- | | |
|---|------------------------|
| - надплечники | 2 шт.; |
| - реклинатор | 1 шт.; |
| - пояс | 1 шт.; |
| - комплексный бандаж бедра и голени | 2 шт.; |
| - голеностопы | 2 шт.; |
| - мысково-подошвенные | по 2 компл.; |
| - элементы крепления | 15 шт.; |
| - компенсаторные элементы | 8 пар; |
| - комплексный бандаж плеча и предплечья | 2 шт. (дополнительно); |

тяги:

- | | |
|---|---------|
| - нагрузочные | 12 шт.; |
| - корректирующие | 4 шт.; |
| - для комплексного бандажа плеча и предплечья (дополнительно) | 8 шт. |

Выпускается 6 типоразмеров, артикул 1Д.00.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Вывих и подвывих тазобедренных суставов, пороки сердца различной этиологии с выраженными нарушениями гемодинамики, частые пароксизмальные состояния, психопродуктивные синдромы, шизофрения, грыжи Шморля и другие выраженные дистрофические изменения позвоночника, хронические заболевания внутренних органов с выраженной недостаточностью их функций,

выраженный гипертензионно-гидроцефальный синдром, острые инфекционные заболевания.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ: Устройство собирается из установочно-базовых элементов и тяг и надевается на пациента поверх одежды. Фиксация устройства на теле пациента осуществляется посредством застёжки текстильной ворсовой типа «Контакт».
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ: Применение устройства обеспечивает:
 - уменьшение интенсивности или полное устранение основных патологических тонических рефлексов (ЛТР, ШСТР);
 - рефлекторную коррекцию патологических мышечных синергий;
 - рефлекторную коррекцию порочного положения туловища и нижних конечностей;
 - тренировку ослабленных мышц в оптимальном режиме;
 - нормализацию траекторных характеристик общего центра масс;
 - выработку нового двигательного стереотипа, максимально приближенного к физиологическому;
 - модуляцию познавательных функций мозга и эмоционально-волевой сферы;
 - развитие речи.
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Устройство может использоваться как в лечебно-профилактических учреждениях, так и в условиях повседневной жизни. В повседневной жизни устройство может использоваться после прохождения курса обучения. Пользователь должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению устройством.

Главный инженер



М.М. Чулкова