


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НИИ «Огонек»

Чугунов В.В.
2010 г.

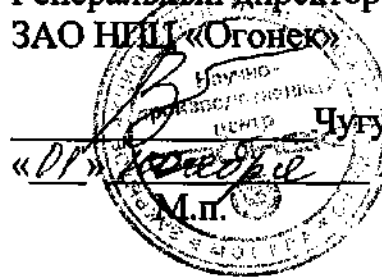

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

Бандаж ортопедический тазовый БН6-16 (далее – бандаж).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Бандаж предназначен для стягивания и удержания костей таза после травм и операций на костях таза и разрывах лонного сочленения.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Бандаж состоит из 2-х деталей: основного элемента и усиливающей ленты. Детали бандажа изготовлены из ткани "Трикор", ленты эластичной "BOOS". Фиксация бандажа осуществляется посредством застежки текстильной ворсовой типа "Контакт" и шлевок из полиамида.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Наличие повреждений кожных покровов. Осторожно применять при вентральных и паховых грыжах.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажное белье. При повреждениях костей таза изделие надевается так, чтобы нижний край бандажа находился на уровне седалищного бугра.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** За счет бандажных свойств обеспечивается легкая фиксация поясничного отдела позвоночника, тепловое и микромассажное воздействие на подлежащие ткани, а так же фиксация костей таза, удержание мышц передней брюшной стенки и ягодичной области. Лента усилитель обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Бандаж должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению бандажом. Бандаж не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать бандаж следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

Чулкова М.М.