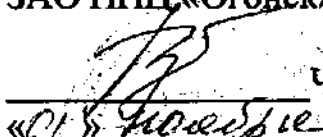


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

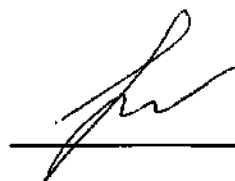

Чугунов В.В.
«01» ноября 2010г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Реклинатор эластичный КР1-16 (далее – реклинатор).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Предназначен для пассивной коррекции осанки у детей и взрослых с удержанием верхне- и средне-грудного отделов позвоночника. Показан для формирования правильной осанки у детей и взрослых при кифозах на уровне Th6 - Th8 позвонков, крыловидных лопатках, остеохондрозе грудного отдела позвоночника, спондилопатиях, остеопорозе.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани "Трикор", планшетные карманы - из ленты капроновой, планшеты и шлевки - из полиамида. Застежка текстильная ворсовая типа "Контакт".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Реклинатор надевается на хлопчатобумажное белье и фиксируется на корпусе пациента посредством застежки текстильной ворсовой типа "Контакт".
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется разведение верхнего плечевого пояса с прижатием лопаток и мягкая коррекция грудного отдела позвоночника с целью его реклинации и разгрузки тел позвончиков без исключения работы собственной мускулатуры.
1. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Реклинатор должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 25°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению. Стирать реклинатор следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.