

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»



Чугунов В.В.

2010г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

Головодержатель мягкой фиксации КР0-82 (далее – головодержатель).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Головодержатель предназначен для умеренной фиксации шейного отдела позвоночника и частичной разгрузки шейных мышц. Показан при умеренных нарушениях функции мышц и связочного аппарата шейного отдела позвоночника, остеохондрозе, спондилезе, динамической нестабильности шейного отдела позвоночника, миозитах и неврологических болях различной этиологии.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Головодержатель изготавливается из трикотажного полотна, пенополиуретана, застежки текстильной ворсовой типа “Контакт”.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Нестабильность шейного отдела позвоночника с угрозой повреждения спинного мозга, локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Головодержатель надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажную прокладку.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Головодержатель за счет конструктивных особенностей, легко моделируется по высоте и объему шеи. Осуществляется ограничение движений шейного отдела позвоночника. Дозированная фиксация и экстензия частично разгружают мышечно-связочный аппарат шейного отдела позвоночника за счет коррекции положением.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Головодержатель должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70 %. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению головодержателем. Головодержатель не должен подвергаться воздействию растворителей щелочей и красящих веществ. Стирать головодержатель следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

Чулкова М.М.