


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

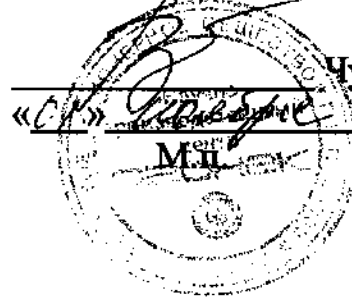

Чугунов В.В.

2010г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению


Корсет ортопедический экстензионный КРО-86 (далее – корсет).

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Корсет предназначен для фиксации позвоночника в сагиттальной плоскости в положении экстензии. Корсет показан в раннем реабилитационном и отдаленном периоде восстановления при травмах и операциях грудного и поясничного отделов позвоночника от Th6 до L5, нуждающихся в стабилизации в сагиттальной плоскости при положении гиперэкстензии. При остеохондродистрофиях (болезнь Шейерманна Мау, Кальве, Кюммеля) и прочих заболеваниях, поражающих тела позвонков, нестабильном остеохондрозе с выраженным корешковым синдромом в области грудопоясничного и поясничного отделов позвоночника.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Грудной, лобковый, поясной пелоты и пелот спины изготовлены из полистирола, верхняя и нижняя шины - из алюминиевого сплава, шлевки и заклепки - из полиамида, фасонные винты имеют головки из полистирола, смягчающие элементы грудного, лобкового, поясного пелотов и пелота спины - из пенополиэтилена, поясные и плечевые ремни - из текстильной капроновой ленты. Застежка текстильная ворсовая типа "Контакт".
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Не применяется при необходимости фронтальной стабилизации и тракционного воздействия на позвоночник.
- 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Корсет надевается на хлопчатобумажную одежду и подгоняется по телу пациента. Регулировка по высоте (расстояние между грудным и лобковым пелотами) осуществляется перемещением верхней и нижней планок относительно поясного пелота с учетом анатомических особенностей пациента, с последующей фиксацией фасонными винтами. Возможна дополнительная регулировка положения грудного и лобкового пелотов за счет ряда отверстий на пелотах. Регулировка по объему талии осуществляется поясным ремнем с последующей фиксацией лентой-контакт - "Велькро". Возможна дополнительная коррекция верхней планки с целью необходимой экстензии с последующим прижимом грудного

пелота с помощью плечевого ремня. Во избежание поломок не рекомендуется вворачивать фиксирующие винты с фасонными головками каким-либо инструментом.

5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Корсет работает по методу трехточечной фиксации с опорой на костные структуры грудины, лобкового сочленения и крестца. При надевании производится гиперэкстензия позвоночного столба с фиксацией в сагиттальной плоскости.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Корсет должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению корсетом. Корсет не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть корсет следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

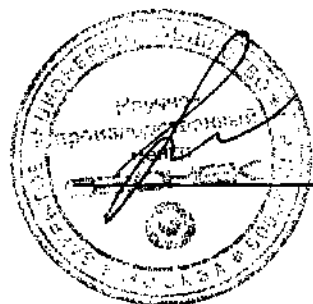

Чулкова М.М.