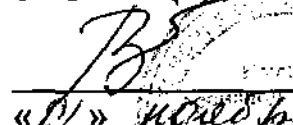


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«11» ноября 2010 г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Аппарат на тазобедренный сустав с регулируемым шарниром (правый, левый)
АН6-06 (далее – аппарат).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Аппарат предназначен для лечения последствий переломов и операций в области костей таза и тазобедренного сустава, при артрозе тазобедренного сустава, эндопротезировании тазобедренного сустава.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Аппарат состоит из смягчающих и конструктивных элементов, а также фиксирующих ремней на бедро. К смягчающим элементам относятся смягчающие вкладыши полукорсета и бандаж бедра. Конструктивные элементы:

- Полукорсет;
- Спинка полукорсета;
- Шарнирная лонгета тазобедренного сустава;
- Регулируемый шарнир;
- Ползунковый винт;
- Шина бедра;
- Накладная пластина бедра;
- Крепежная планка бедра;
- Крепежная планка полукорсета;
- Крепежные винты;
- Накладка на бедро (внутренняя сторона);
- Застежка-контакт “Велькро”.


Дополнительно в комплект поставки входят:

- Отвертка;
- Крепежные винты - 2 шт.

3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Не обеспечивает осевой разгрузки тазобедренного сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Установить шарнирную лонгету тазобедренного сустава на полукорсете с помощью крепежных винтов и крепежной планки, располагающейся по внутренней поверхности. Ослабить крепежные винты и установить накладную пластину бедра в необходимое положение, винты зафиксировать. В соответствии с объемом бедер выбрать спинку нужного размера. Выставить объем полукорсета и зафиксировать винтами. Произвести подгонку полукорсета, фиксацию шарнирной лонгеты к полукорсету, выставить на необходимую высоту накладную пластину бедра,

- по окончании сборки аппарата в полукорсет вставить смягчающие вкладыши. На больного надеть смягчающий чехол бедра, затем надеть полукорсет, на смягчающем чехле бедра с помощью застёжки "Контакт" зафиксировать накладную пластину бедра с шиной и накладку на бедро. После фиксации бедренными ремнями пластины бедра и накладки аппарат готов к применению.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Аппарат обеспечивает наружную фиксацию костей таза и тазобедренного сустава с дозированной амплитудой движений в сагиттальной плоскости. При необходимости аппарат может использоваться для этапной разработки контрактур тазобедренного сустава.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Аппарат должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению аппаратом. Аппарат не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть аппарат и стирать мягкие вкладыши следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

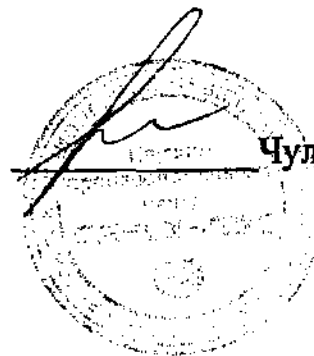

Чулкова М.М.