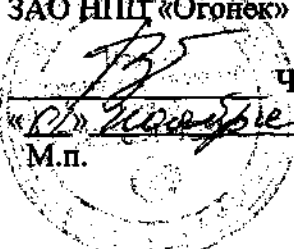


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«25» ноября 2010г.
М.п.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

Тутор-стоподержатель (правый, левый) ТН0-24 (далее – тутор).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Применяется при патологической эквинусной, варусной, вальгусной установке стопы при вялых параличах различной этиологии (спинномозговые травмы, спинномозговые грыжи, ОНМК, нейроинфекция, ДЦП, последствия поражения невритов, периферических нервов).
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Тутор изготовлен из листового полипропилена, ленты-контакт «ВЕЛКРО».
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Наличие эквиноварусной или вальгусной установки голеностопного сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Тутор применяется вместе с обычной обувью, с целью удержания стопы в физиологически выгодном положении.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивает удержание стопы в физиологически выгодном положении для восстановления естественного рисунка ходьбы.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Туторы должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению тутором. Тутор не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть тутор следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.