


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

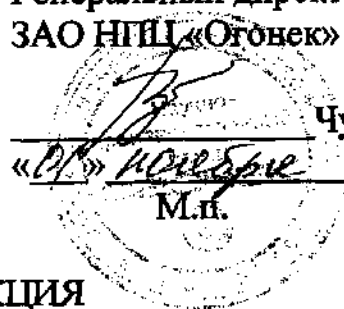

Чугунов В.В.

2010 г.

«09» ноября
М.п.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

**Бандаж ортопедический на голеностопный сустав полуразъемный БН6-06
(далее – бандаж).**

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Предназначен для поддержания и фиксации голеностопного сустава в период реабилитации после травм связочного аппарата, при нестабильности голеностопного сустава.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Бандаж изготовлен из ткани "Трикотаж", шлевки - из полиамида, застежки - текстильные ворсовые типа "Контакт".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж надевается непосредственно на тело или на хлопчатобумажный носок.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется фиксация голеностопного сустава, микромассажное и тепловое воздействие, улучшается трофика подлежащих мягких тканей.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Бандаж должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению бандажом. Бандаж не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать бандаж следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

М.М. Чулкова