


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

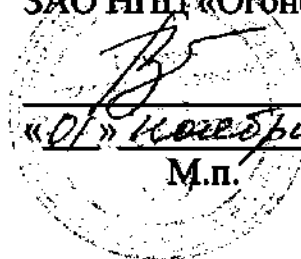

Чугунов В.В.

«01» ноября 2010 г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Бандаж ортопедический на голеностопный сустав короткий БН6-08 (далее-бандаж).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Бандаж предназначен для поддержания и фиксации голеностопного сустава в период реабилитации при легких повреждениях связочного аппарата.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Бандаж изготовлен из пластины резино-тканевой "Трикор".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажный носок.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется умеренная стабилизация голеностопного сустава, микромассажное и тепловое воздействие, улучшается трофика подлежащих мягких тканей.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Бандаж должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению бандажом. Бандаж не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Бандаж следует надевать на хлопчатобумажное белье. Стирать бандаж следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

М.М. Чулкова