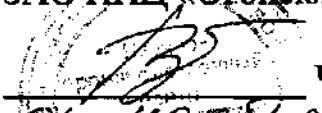


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«01» ~~ноября~~ 2010г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Тутор на коленный сустав для взрослых ТН4-10 (далее – тутор).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Применяется в реабилитационном периоде после травм и операций в области дистального отдела бедренной кости и проксимального отдела костей голени; при травмах капсульно-связочного аппарата коленного сустава, гемартрозах, артрозо-артритах, бурситах, синовитах, менискитах, умеренной варусной и вальгусной девиации голени, рекурвации коленного сустава, параличах мышц нижней конечности различной этиологии. Предназначен для иммобилизации коленного сустава с фиксацией 2/3 бедра и 2/3 голени.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани “Трикор”, шлевки - из полиамида, лонгетные карманы - из капроновой ленты, лонгеты - из алюминиевого сплава. Для фиксации используются застежки текстильные ворсовые типа “Контакт”.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Не применяется при выраженной сгибательной контрактуре коленного сустава, при невозможности нагрузки на нижнюю конечность.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Тутор надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажное белье.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Достигается иммобилизация коленного сустава с фиксацией 2/3 бедра и 2/3 голени. Металлические шины профилируются с учетом антропометрических особенностей. Система креплений позволяет регулировать степень компрессии.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Туторы должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению тутором. Тутор не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть тутор следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер


Чулкова М.М.