

«УТВЕРЖДАЮ»

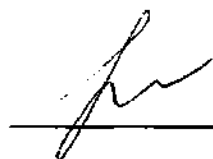
Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«01» ноября 2010г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Наколенник с шарнирами и тягами Н7 (далее – наколенник).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Наколенник показан при рекурвации коленного сустава различной этиологии, состояниях после травм и операций в области сустава при необходимой стабилизации во фронтальной и сагитальной плоскостях, при повреждении связочного аппарата коленного сустава в предоперационном периоде и на этапе восстановительного послеоперационного лечения.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани «Трикор». Наколенник армирован двумя профилированными шарнирами с объемом движения 95°. Ремни фиксации имеют застёжки текстильные ворсовые типа «Контакт».
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Наколенник надевается непосредственно на тело.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется фиксация коленного сустава во фронтальной плоскости с предотвращением переразгибания в коленном суставе, дозированная компрессия и прогрев подлежащих тканей.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Наколенник должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению наколенником. Наколенник не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать наколенник следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.