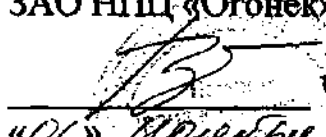


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«01» ~~Мая~~ Июня 2010г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Разгружающая повязка для верхней конечности «Змейка» (левая, правая) ПВЗ.

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Повязка назначается при необходимости фиксации и разгрузки верхней конечности после травм и операций, повреждении ключично-акромиального сочленения, вывихе плеча, в период ранней реабилитации после переломов шейки плеча и плечевой кости, костей предплечья.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани "Трикор", пряжки-замки - из полиамида.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Не применяется при необходимости жесткой фиксации ключицы, плечевого или локтевого суставов, плечевой кости.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Повязка надевается непосредственно на тело или поверх одежды.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Повязка должна обеспечивать разгрузку, нейтрализацию собственного веса пораженной верхней конечности и фиксацию ее в щадящем положении.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Повязки должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению повязкой. Повязка не должна подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать повязку следует с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.