


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

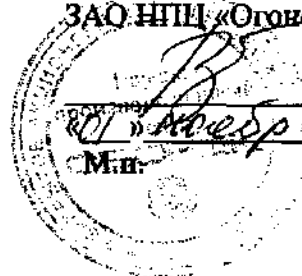

Чугунов В.В.
2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению


Аппарат на коленный сустав с регулируемым шарниром (правый, левый) АН4-10
(далее – аппарат).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Аппарат применяется в период ранней реабилитации после травм и операций на коленном суставе, дистальном отделе бедра и проксимальном отделе голени; при проведении этапного лечения сгибательных и разгибательных контрактур коленного сустава; при угрозе рекурвации и девиации голени; после артроскопических операций, повреждений связочного аппарата и менисков коленного сустава; при деформирующем остеоартрозе.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Аппарат состоит из смягчающих и конструктивных элементов, а также фиксирующих ремней на бедро. К смягчающим элементам относятся бандаж бедра и бандаж голени.
Конструктивные элементы:
 - Шарнирная лонгета коленного сустава
 - Регулируемый шарнир
 - Ползунковый винт
 - Крепежная планка бедра
 - Накладная пластина бедра
 - Шина бедра
 - Шина голени
 - Накладная пластина голени
 - Крепежная планка голени
 - Крепежные винтыДополнительно в комплект входят:
 - Отвертка;
 - Крепежные винты - 2 шт.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Ослабить крепежные винты шарнирной лонгеты коленного сустава и отрегулировать её по длине, установив накладную пластину голени или бедра в необходимое положение. Винты зафиксировать. Повернуть ползунковый винт на два оборота. Нажать на него и выставить на необходимое количество градусов на стороне движения, а затем завернуть винт. Надеть на больного поверх трико

смягчающие бандажи бедра и голени. На смягчающих бандажах с помощью застёжки "Контакт" с наружной и внутренней стороны фиксируются смонтированные и отрегулированные шарнирные лонгеты коленного сустава так, чтобы ось вращения шарниров аппарата совпала с осью вращения коленного сустава. Для этого центры шарниров выставляются на уровень суставной щели.

5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Достигается фиксация 2/3 бедра и 2/3 голени с регулируемым объемом движения в коленном суставе от 0 до 100° при сгибании. Исключаются ротационные движения в коленном суставе.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Аппарат должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению аппарата. Аппарат не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть аппарат и стирать мягкие вкладыши следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

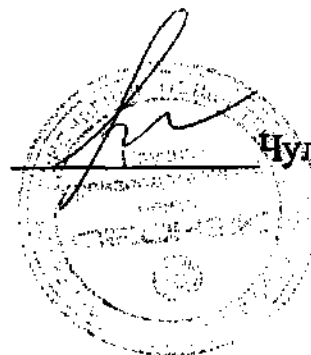

Чулкова М.М.