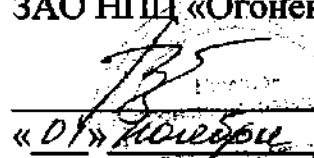


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«01» ноября 2010 г.


М.п.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Тутор на локтевой сустав детский (правый, левый) ТР4-06 (далее – тутор).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Тутор показан в период реабилитации после травм и операций в области проксимального отдела костей предплечья и дистального сегмента плечевой кости; при сгибательных установках в локтевом суставе; травмах капсульно-связочного аппарата локтевого сустава, гемартрозах.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани “Трикор” типа «Нормофлекс», шлевки - из полиамида, лонгетные карманы - из капроновой ленты, лонгеты - из алюминиевых сплавов. Застежка текстильная ворсовая типа “Контакт”.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция, фиксированные сгибательные контрактуры локтевого сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Тутор надевается непосредственно на верхнюю конечность и фиксируется с помощью застежки текстильной ворсовой типа “Контакт”.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивается жесткая фиксация кисти и дистального отдела предплечья. Жесткие металлические вставки позволяют фиксировать лучезапястный сустав в необходимом положении, застёжка «Контакт» обеспечивает регулируемую степень фиксации сегментов верхней конечности. Карманы для лонгет имеют клапаны, что позволяет извлекать лонгеты и профилировать их в индивидуальном порядке.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Туторы должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению тутором. Мыть тутор следует с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

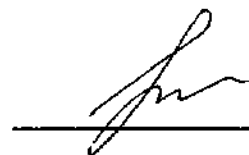
Чулкова М.М.