


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
2010г.

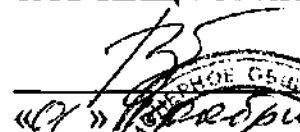

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Аппарат на локтевой сустав AP4-05 (далее – аппарат).

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Аппарат показан при нарушениях активных функций локтевого сустава, обусловленных преимущественно последствиями заболеваний или травматических повреждений как самого сочленения, так и окружающих его структур (капсул, связок, мышц, нервов), проявляющихся также их контрагированием, нарушением целостности с нестабильностью и патологической подвижностью. Абсолютным показанием к применению является реабилитация больных после операции на локтевом суставе (артропластика и т.п.) с целью раннего восстановления объема движения.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Металлические шины плеча и предплечья выполнены из алюминиевых сплавов. Фиксирующие пелоты плеча и предплечья, а также Фиксирующие винты шарнирных узлов с фасонными головками выполнены из полистирола. Детали шарнирных узлов изготовлены из полиамида. Соединения шарнирных узлов с металлическими шинами осуществляется заклепками из алюминиевых сплавов. Установочные бандажи плеча и предплечья выполнены из ткани типа “Нормофлекс”. Фиксирующие ремни, шлевки фиксирующих лент изготовлены из полиамида. Застежка текстильная ворсовая типа “Контакт”.
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Аппарат противопоказан при острых воспалительных процессах в области сустава, требующих обеспечения полной его иммобилизации; при развивающемся и (или) планируемом анкилозировании сустава.
- 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Аппарат надевается на хлопчатобумажное белье и фиксируется на верхней конечности посредством застежки текстильной ворсовой типа “Контакт”.
- 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Аппарат предназначен для удержания предплечья и плеча в локтевом сочленении в заданном положении с возможностью осуществления регулируемых по амплитуде активных и пассивных движений в локтевом суставе и фиксации его механизмом шарнира. Заданный объем движения или фиксированное положение в локтевом суставе обеспечивается установкой ограничителей движения шарнирного узла в заданном положении с последующей фиксацией винтами. Оптимальное положение фиксирующих пелотов достигается передвижением их относительно

металлических шин с последующей фиксацией винтами. Фиксация узлов с установленными бандажами производится фиксирующими ремнями.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Аппараты должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению аппаратом. Стирать аппарат следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер



Чулкова М.М.