


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПП «Огонек»

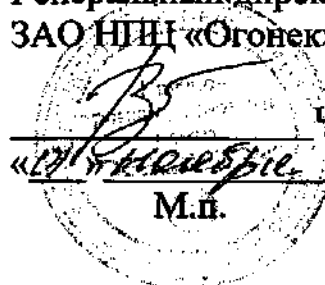

Чугунов В.В.
2010 г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Бандаж ортопедический для поддержания передней брюшной стенки при ее перерастяжении БН2-07 (далее – бандаж).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Бандаж показан при опущении внутренних органов, в том числе при нефропатозе, блуждающей почке, при вентральных грыжах, диастазе прямых мышц живота, угрозе формирования послеоперационных грыж передней брюшной стенки, послеродовой гипотонии мышц передней брюшной стенки. Применяется в домашних условиях.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Бандаж изготовлен из ленты эластичной "BOOS", пенополиуретана, полотна трикотажного и застежки текстильной ворсовой типа "Контакт".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция, кифотическая деформация.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж надевается на хлопчатобумажную одежду и фиксируется на теле пациента посредством застежки текстильной ворсовой типа "Контакт".
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж осуществляет поддержание в физиологически правильном положении органов брюшной полости. Длительное ношение не приводит к гипотрофии мышц.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Бандаж должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в памятке по применению бандажом. Бандаж не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Бандаж следует надевать на хлопчатобумажное белье. Стирать бандаж следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

Чулкова М.М.