


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Оgoneк»

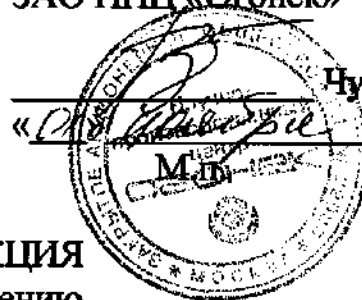

Чугунов В.В.
2010г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

**Корсет ортопедический на поясничный отдел позвоночника для детей КРО-87Д
(далее – корсет).**

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Предназначен для фиксации поясничного отдела позвоночника. Показания к применению: последствия травм и операций поясничного отдела позвоночника, остеохондроз позвоночника, спондилолистез, остеопороз, как элемент реклинирующей системы при нарушении осанки и кифотических деформаций позвоночника.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Детали корсета: основной элемент и усиливающая лента изготовлены из ткани "Трикор". В усилительном элементе используется трикотажная эластичная лента "BOOS". Основные элементы включают в себя четыре лонгеты, изготовленные из полипропилена, армированные пружинной проволокой. Карманы для лонгет изготовлены из капроновой ленты, шлевки - из полиамида. Застежка - текстильная ворсовая типа "Контакт".
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Осторожно применять при наличии вентральных и диафрагмальных грыж.
- 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Корсет надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажное белье, подгоняется по телу пациента за счёт профилирования лонгет по изгибу лордоза, плотно фиксируется на поясничном отделе с помощью застежки текстильной ворсовой типа "Контакт".
- 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляет фиксацию поясничного отдела позвоночника в физиологически выгодном положении, удержание мышц передней брюшной стенки. Лента-усилитель дает дополнительную фиксацию.
- 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Корсет должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению корсетом. Корсет не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать корсет следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

Чулкова М.М.