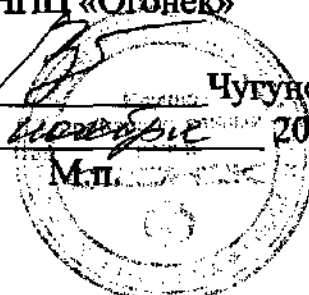


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«01» ноября 2010г.
М.п. 

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

**Стельки ортопедические при плоскостопии и сопутствующих заболеваниях
мужские ОС-ПМ (далее – стельки).**

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Стельки обеспечивают правильную статическую установку стопы, компенсирование дефектов подошвенной поверхности стопы при профилактике и лечении плоскостопия (продольного, поперечного, комбинированного) и сопутствующих заболеваний.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Стельки изготавливаются из пластины резино-тканевой «Трикор», каплена, клея резинового.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Выраженная деформация стопы.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Стельки вкладывается в обувь, имеющую жесткий задник и закрытую носочную часть.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивается правильная установка стопы и поддержка продольных и поперечного сводов стопы. Стельки предназначены для повседневного использования.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Стельки должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 15 до 25°C и относительной влажности воздуха 50-80%. Потребитель должен строго соблюдать указания и требования, изложенные в инструкции по применению. Мыть стельки следует раствором детского мыла.

Главный инженер


Чулкова М.М.