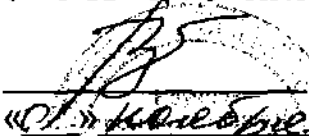


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
2010 г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Распорка детская «Стремена Павлика» СП (далее – распорка).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Назначается при умеренной скошенности крыши вертлужных впадин, а также на втором этапе лечения после «Перинки Фрейка». Распорка показана при консервативном лечении дисплазии тазобедренного сустава и вправленных врожденных вывихов бедра у детей. Может применяться для фиксации положения и в раннем реабилитационном периоде после оперативного вправления врожденных вывихов бедра у детей.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Приемные части изготовлены из полистирола, разводящая штанга, серьги, шлевки и заклепки - из полиамида, застежка-замок - из полистирола, лента и пояс - из текстильной ленты, смягчающий бандаж - из пенополиэтилена, регулирующие винты - из стали, фасонная головка регулирующего винта - из полистирола.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Не устраненные врожденные вывихи бедра, необходимость стабильной фиксации в положении Лоренц I.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Распорка надевается непосредственно на тело или поверх одежды и обеспечивает удержание ребенка в положении Лоренц II.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивает стабильную фиксацию ребенка в положении Лоренц II. Конструктивные особенности распорки позволяют осуществлять лечебные и гигиенические процедуры без снятия распорки. Допускается дозированное снятие распорки по разрешению лечащего врача. Рекомендовано к применению детям в возрасте от 1 до 12 месяцев.
1. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Распорка должна храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность распорки при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению распорки. Распорка не должна подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть распорку следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.