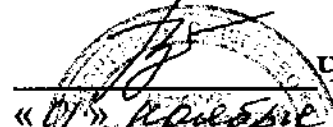
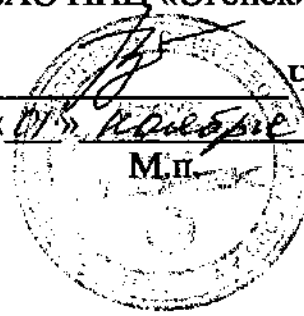


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

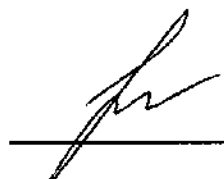

Чугунов В.В.
«01» ~~ноября~~ 2010 г.
М.п. 

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Бандаж ортопедический на шейный отдел позвоночника БН6-12 (далее – бандаж).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Бандаж предназначен для умеренной фиксации шейного отдела позвоночника и частичной разгрузки шейных мышц.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Бандаж изготовлен из ткани "Трикот". Фиксация бандажа осуществляется посредством застежки текстильной ворсовой типа "Контакт".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Нестабильность шейного отдела позвоночника, локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж надевается непосредственно на тело и фиксируется в области шейного отдела позвоночника.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж фиксирует шейный отдел позвоночника, обеспечивает микромассаж кожного покрова шеи с накоплением тепла для улучшения микроциркуляции крови в мышцах.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Бандаж должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению бандажом. Бандаж не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать бандаж следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.