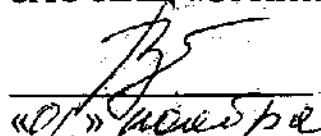


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«01» ноября 2010г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

Наколенник с шарнирами и надпателлярным отверстием Н6 (далее – наколенник).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Состояние после травм и операций коленного сустава, умеренная варусная и вальгусная девиация голени, артрозо-артриты, состояние после артроскопии, менискиты, лигаментиты, бурситы, синовиты, надпателлярные бурситы.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани «Трикор». Наколенник армирован двумя профилированными шарнирами, выполненными из ударопрочных пластмасс. Ремни фиксации имеют застежки текстильные ворсовые типа «Контакт».
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Наколенник надевается непосредственно на тело.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется фиксация коленного сустава во фронтальной плоскости, дозированная компрессия и прогрев подлежащих тканей, защита мягких тканей суставной области от механического воздействия.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Наколенник должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению наколенником. Наколенник не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать наколенник следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.