


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НИИ «Ортопед»

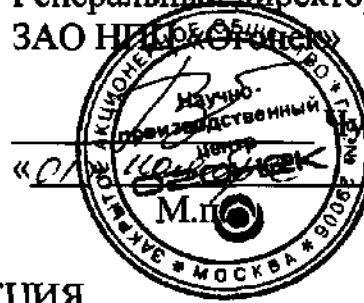

унов В.В.
2010г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

Наколенник разъемный с шарнирами Н9 (далее – наколенник).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Назначается в реабилитационном периоде после травм и операций коленного сустава, умеренной варусной и вальгусной девиации голени, артрозо-артритах, состояниях после артроскопии, менисцитах, легаментитах, бурситах, синовиатах, надпателлярных бурситах.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани "Трикор". Наколенник армирован двумя профилированными шарнирами с объемом движения 95°. Ремни фиксации имеют застежки текстильные ворсовые типа "Контакт".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Не применяется при выраженной фронтальной нестабильности коленного сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Наколенник надевается непосредственно на тело.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется фиксация коленного сустава во фронтальной плоскости. Дозированная компрессия и прогрев подлежащих тканей. Защита мягких тканей суставной области от механического воздействия.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Наколенник должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению наколенником. Наколенник не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать наколенник следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

Чулкова М.М.