

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»



Чугунов В.В.

2010 г.

М.п.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

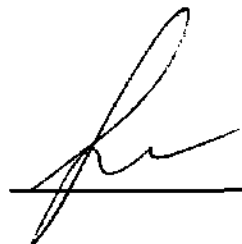
**Аппарат на коленный сустав с замковым шарниром (правый, левый) АН4-09
(далее – аппарат).**

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Применяется для ранней реабилитации после травм и операций на коленном суставе, дистальном отделе бедра и проксимальном отделе голени. При проведении этапного лечения сгибательных и разгибательных контрактур коленного сустава; при угрозе рекурвации и девиации голени. После артроскопических операций, повреждений связочного аппарата и менисков коленного сустава; деформирующий остеоартроз.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Аппарат состоит из смягчающих и конструктивных элементов, а также фиксирующих ремней на бедро. К смягчающим элементам относятся бандаж бедра и бандаж голени. Конструктивные элементы:
 - шарнирная лонгета коленного сустава;
 - замковый шарнир;
 - крепежная планка бедра;
 - накладная пластина бедра;
 - шина бедра;
 - шина голени;
 - накладная пластина голени;
 - крепежная планка голени;
 - крепежные винты.Дополнительно в комплект поставки входят:
 - отвертка;
 - крепежные винты - 2 шт.
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
- 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Ослабить крепежные винты и установить накладную пластину голени или бедра в необходимое положение. Винты зафиксировать. На больного надевают смягчающие бандажи бедра и голени. На смягчающих бандажах с помощью застежки “Контакт” с наружной и внутренней стороны фиксируются смонтированные и отрегулированные шарнирные лонгеты коленного сустава, так, что бы ось вращения шарниров

аппарата совпала с осью вращения коленного сустава. Для этого центры шарниров выставляются на уровень суставной щели.

5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Достигается фиксация 2/3 бедра и 2/3 голени с регулируемым объемом движения в коленном суставе от 0 до 110° при сгибании. Исключаются ротационные движения в коленном суставе.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Аппарат должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению аппаратом. Аппарат не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть аппарат и стирать мягкие вкладыши следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер


Чулкова М.М.