

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПП «Огонек»



Чугунов В.В.
2010г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

Тутор на голень армированный ТН2-07 (далее – тутор).

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Применяется после травм и операций костей голени, при замедленной консолидации костей голени. Обеспечивает наружную фиксацию голени с целью иммобилизации в реабилитационном периоде после травм и операций костей голени.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Основа изготовлена из ткани “Нормофлекс”, шлевки - из полиамида, лонгетные карманы - из капроновой ленты, планшетки - из алюминиевого сплава, лента-контакт - “ВЕЛКРО”.
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Не применяется при необходимости осевой разгрузки костей голени.
- 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Тутор надевается непосредственно на тело.
- 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивает наружную фиксацию голени с целью иммобилизации, тепловое воздействие с целью улучшения трофики мягких тканей.
- 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Туторы должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению тутором. Тутор не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть тутор следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

Чулкова М.М.