

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»



Чугунов В.В.
2010г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Функциональный корректор для приведения первого пальца стопы КРЗ-02
(далее – корректор).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Корректор применяется при деформирующем остеоартрозе первого плюснефалангового сустава стопы (Hallux Valgus) любой степени выраженности и различной этиологии при возможности ненасильственной репозиции. Целесообразно применение корректора для профилактики рецидива деформации после корригирующих операций.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Корректор изготавливается из пенопропилена, смягчающий элемент – из пенополиэтилена, застежка - контакт "ВЕЛКРО".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Корректор не показан при стойких деформациях I плюсне-фалангового сустава, массивных грибковых поражениях пальцев стоп и открытых повреждениях покровов (язвы, трещины и так далее) в области применения шины.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Корректор надевается непосредственно на стопу и на первый палец. Рекомендуются применение шины в режиме лечебной укладки на ночь.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляет упругую коррекцию в области I плюсне-фалангового сочленения различной этиологии.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Корректор должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению корректором. Корректор не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть корректор следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Чулкова М.М.", written over a horizontal line.

Чулкова М.М.