

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»



Чугунов В.В.

2010г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Тугор на голеностопный сустав (правый, левый) ТН0-22
(далее – тугор).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Применяется при последствиях травм и операций на голеностопном суставе, последствиях повреждения межберцового синдесмоза, варусной, вальгусной девиации стопы, нестабильности голеностопного сустава, не осложненных переломах лодыжек в стадии консолидации. Предназначен для стабильной фиксации голеностопного сустава и дистального отдела голени.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Тугор должен соответствовать требованиям технических условий, комплекту документации и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Не применяется при выраженных фиксированных деформациях голеностопного сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Тугор надевается непосредственно на хлопчатобумажный носок.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Тугор обеспечивает фиксацию вилки голеностопного сустава, стабилизацию пяточной кости и защиту в области сустава и нижней трети голени от фронтальных смещающих сил при сохранении тыльного и подошвенного сгибания.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Тугоры должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению тугором. Тугоры не должны подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ.

Главный инженер

Чулкова М.М.