

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НИИ «Огонек»

Чугунов В.В.
2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Бандаж ортопедический на запястье БН6-01 (далее – бандаж).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Бандаж предназначен для фиксации и ограничения движения в лучезапястном суставе в период реабилитации после травмы, а также для предотвращения перерастяжения связок лучезапястного сустава при поднятии тяжестей.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Бандаж изготовлен из ткани "Трикор". Фиксация бандажа осуществляется с помощью застежки текстильной ворсовой типа "Контакт" и шлевки из полиамида.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж надевается непосредственно на запястье.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется наружная фиксация лучезапястного сустава с дозированной компрессией.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Бандаж должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению бандажом. Бандаж не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать бандаж следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

 Чулкова М.М.