


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НИЦ «Орион»

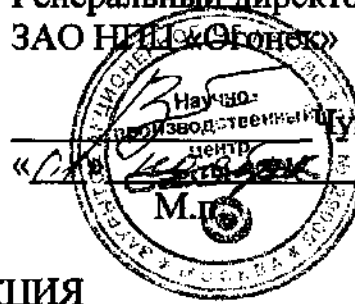

Чулунов В.В.
2010 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

Бандаж ортопедический грыжевой паховый двусторонний БН5-09 (далее – бандаж).

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Бандаж предназначен для предотвращения выпячивания паховой и пахово-мошоночной грыжи.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Бандаж состоит из поясов, выполненных из ткани "Трикор" и пелотов для удержания грыжевого дефекта, выполненных из полиэтилена ламинированного. Пелоты фиксируются на поясах по принципу соединения типа "Контакт". Фиксация бандажа на теле пациента осуществляется с помощью застежки текстильной ворсовой типа "Контакт" и пряжки из полиамида.
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Бандаж противопоказан при невосправляемых формах паховой и пахово-мошоночной грыж, а также при необходимости значительного воздействия на паховое кольцо для предотвращения его выпячивания в условиях повседневной жизни пациента.
- 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж надевается непосредственно на тело в положении стоя, регулировка по размеру поясного ремня осуществляется за счет изменения длины ленты эластичной.
- 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж предназначен для применения в повседневной жизни бодрствующего пациента.
- 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Бандаж должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в памятке по пользованию бандажом. Бандаж не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Бандаж следует надевать на хлопчатобумажное белье. Стирать бандаж следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

М.М. Чулкова