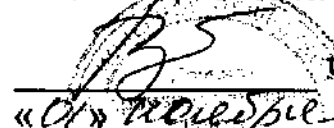


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Отецек»


Чугунов В.В.
«01» ноября 2010 г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

Аппарат ортопедический для отведения и установки бёдер в заданном положении АН-12
(далее – аппарат).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Аппарат показан при спастических подвывихах бедра.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Аппарат состоит из пелота поясничного, верхнего узла и двух гильз бедра, закреплённых на шинах с помощью нижнего узла. Верхний узел закреплён на пластине, зафиксированной на пелоте поясничном, пелот с верхним узлом одет в чехол. Верхний узел посредством металлической штанги соединяется с гильзой бедра, положение которой регулируется в заданном диапазоне. При изготовлении аппарата используются следующие материалы: полиэтилен, сталь 12Х18Н10Т, алюминиевый сплав Д16АТ, нормофлекс, клей резиновый, сплав титановый ВТ6, полипропилен, заклепки «Холлнитен», каплен, застёжка типа «Контакт».
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Выраженные гиперкинезы, фиксированные контрактуры тазобедренных суставов.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Аппарат надевается поверх одежды. С помощью ключа осуществляется регулировка шарниров тазового модуля в трёх плоскостях с целью отведения и установки каждого бедра в заданном положении. Фиксация аппарата на теле пациента осуществляется с помощью застёжки текстильной ворсовой типа «Контакт».
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Аппарат обеспечивает фиксацию головки бедра в вертлужной впадине.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Аппарат должен храниться на стеллаж на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению аппаратом. Аппарат не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть аппарат следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер


Чулкова М.М.