


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПП «Огонек»

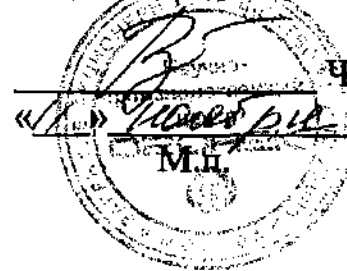

Чугунов В.В.

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению


Аппарат на тазобедренный сустав с замковым шарниром (правый, левый) АН6-05
(далее – аппарат).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Аппарат применяется при лечении последствий переломов и операций в области костей таза и тазобедренного сустава, артрозе тазобедренного сустава, вялых и спастических параличах различной этиологии, нарушающих опороспособность конечности, эндопротезировании тазобедренного сустава.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Аппарат состоит из смягчающих и конструктивных элементов, а также фиксирующих ремней на бедро. К смягчающим элементам относятся смягчающие вкладыши полукорсета и бандаж бедра. Конструктивные элементы:
 - Полукорсет;
 - Спинка полукорсета;
 - Шарнирная лонгета тазобедренного сустава;
 - Замковый шарнир;
 - Шина бедра;
 - Накладная пластина бедра;
 - Крепежная планка бедра;
 - Крепежная планка полукорсета;
 - Крепежные винты;
 - Накладка на бедро (внутренняя сторона);
 - Застежка-контакт «ВЕЛКРО»;Дополнительно в комплект поставки входят:
 - Отвертка;
 - Крепежные винты - 2 шт.Изготавливается двух типоразмеров.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Аппарат не обеспечивает осевой разгрузки тазобедренного сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Установить шарнирную лонгету тазобедренного сустава на полукорсете с помощью крепежных винтов и крепежной планки, расположенной по внутренней поверхности. Ослабить крепежные винты и установить накладную пластину бедра в необходимое положение. Винты зафиксировать. В соответствии с объемом бедер выбрать

спинку нужного размера. Выставить объем полукорсета и зафиксировать винтами. Произвести подгонку полукорсета, фиксацию шарнирной лонгеты к полукорсету, выставить на необходимую высоту накладную пластину бедра. По окончании сборки аппарата вставить в полукорсет смягчающие вкладыши. Надеть на больного смягчающий чехол бедра, затем надеть полукорсет. На смягчающем чехле бедра с помощью застежки "Контакт" фиксируется накладная пластина бедра с шиной и накладка на бедро. После фиксации бедренными ремнями пластины бедра и накладки аппарат готов к применению.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ: Аппарат обеспечивает наружную фиксацию тазобедренного сустава с восстановлением опороспособности и подкосоустойчивости конечности в момент нагрузки при закрытом замке. Замок срабатывает автоматически при разгибании сустава до 180° .
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Аппарат должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха $50\ldots 70\%$. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению аппаратом. Аппарат не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть аппарат и стирать мягкие вкладыши следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

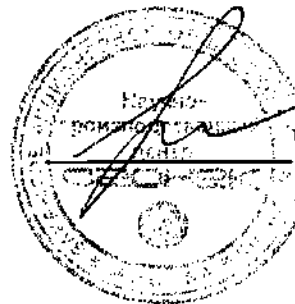

Чулкова М.М.